

 Nestlé Health Science

Compat ella®

Stručný průvodce



Znáte se s Compat Ella®?


Stručný průvodce

- Tento stručný průvodce nenahrazuje originální návod k použití. Před použitím si přečtete kompletní návod k použití.
- Návod k použití je dostupný na stránkách www.compatella.com
- Pumpa není určena k nitrožilnímu podání. Jen pro enterální použití.
- U pacientů, kteří vyžadují stálý přísun výživy, použijte pouze enterální sondovou výživu a zajistěte odpovídající a pravidelnou kontrolu podávání nutriční terapie.
- Interaktivní tréninkové centrum: www.trainingcentre.compatella.com

Compat ella®
Training Center

Příprava pumpy a setu

1. Otevřete uzávěr nadzvednutím západky palcem.
2. Nasadte smyčku kazety kolem rotoru. Šipka ukazuje správnou orientaci.
3. Palcem zasuněte kazetu směrem doprava, aby se připevnila v pumpě.
4. Zavřete uzávěr stisknutím symbolu „PUSH“.

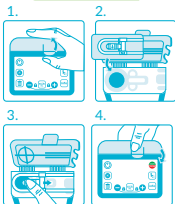

⚠ Varování: Používejte pouze výživové sety Compat Ella®.

Význam barevného zvýraznění



Informace
o programování:
černé znaky



Normální provozní
podmínky:
zelené ikony
s **černými** znaky.



Alarmy: **červené**
znaky a ikony



Informace:
modré znaky



Nastavení:
zelené znaky

Seznamte se s Compat Ella®

Přehled funkčních tlačítek

Tlačítko	Funkce
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro zapnutí nebo vypnutí přístroje.
	Stiskněte pro spuštění nebo pozastavení nutriční terapie nebo odložení alarmu.
	Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund pro automatické Natékání. Opětovným stisknutím předčasně zastavíte automatické Natékání.
	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet rychlosti a programování objemu.
	Stiskněte pro snížení / zvýšení hodnoty (podržte tlačítko pro rychlejší změnu nastavení). Stiskněte obě tlačítka současně pro zamknutí nebo odemknutí klávesnice.
	Stisknutím vymažete aktuální hodnotu na obrazovce a nastavíte výchozí hodnotu nebo 0. Stiskněte a podržte tlačítko pro resetování všech parametrů nutriční terapie.
	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet informace o nutriční terapii. Stiskněte a podržte pro přístup k procházení 30ti denní historii objemů.
	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet nastavení pumpy.

Podávání výživy v kontinuálním režimu

Krok	Tlačítko	Funkce
1.	 2"	Zapnutí pumpy
2.		Kontrola nastavení OBJEM PODANY BEHEM TETO TERAPIE
3.		Vymazání nastavení OBJEM PODANY BEHEM TETO TERAPIE
4.	 2"	Natékání do výživového setu
5.		Pomocí + a - NASTAVTE RYCHLOST 1-600 ml/hod
6.		Pomocí + a - NASTAVTE OBJEM 1-4 000 ml/CONT*
7.		Spuštění nutriční terapie

*CONT.: Žádný objem výživy není nastaven. Pumpa poběží nepřetržitě, dokud se nevyčerpá výživový roztok.

Pozor:








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

- Při programování nové terapie se ujistěte, že jste vymazali parametr **OBJEM PODANY BEHEM TERAPIE** (viz krok 3 výše).
- Po zahájení terapie zkontrolujte všechny parametry terapie **RYCHLOST**, **DAVKY** a **OBJEM PODANY BEHEM TERAPIE**.

Režim přerušované výživy

Další informace viz Návod k použití.

Usnadňuje výživu sondou

Alarmové zprávy a řešení

Zpráva	Řešení
	Zkontrolujte hadičky a ověřte, zda je set zcela naplněný. Pokud je zapotřebí další plnění, můžete automatické plnění zopakovat.
	Ukončete podávání výživy nebo naprogramujte novou nutriční terapii. Poznámka: Pokud se dodaný objem před novou nutriční terapií nevymaže, zazněl by alarm pro konec terapie předčasně.
	Pokračujte v podávání výživy nebo pumpu vypněte. Tlačítkem  můžete prodloužit dobu neaktivity o další 2 minuty.
	Zavřete uzávěr pumpy.
	Otevřete uzávěr a zkontrolujte, zda jsou kazeta a hadičky správně založeny.
	Výživová terapie skončila a zásobník s výživou je prázdný. Ujistěte se, že výživový set neobsahuje vzduchové bubliny v oblasti mezi zásobníkem s výživou a pumpou a výživový set je správně připojen k zásobníku na výživu a je zcela naplněný.
	ŽÁDNÝ PŘÍTOK: Zkontrolujte, zda nedošlo k zalomení nebo zablokování hadiček výživového setu PŘED pumpou. ŽÁDNÝ ODTOK: Zkontrolujte, zda nedošlo k zalomení nebo zablokování hadiček výživového setu a sondy ZA pumpou. V případě potřeby sondu propláchněte. Umístěte všechny hadičky tak, aby mohla výživa volně protékat. Otevřete uzávěr, zkontrolujte založení výživového setu a zavřete uzávěr.
	Adaptérem připojte pumpu k napájení. Nabijte baterii.
	Odstraňte zdroj magnetického rušení nebo přesuňte pumpu jinam.
	Pumpu vypněte a znovu zapněte pro odstranění chyb. Pokud se chyba vrací nebo opakuje, pumpu nepoužívejte. Kontaktujte místního zástupce společnosti Nestlé Health Science nebo servis schválený společností Nestlé Health Science.

Čištění pumpy

Pumpu čistěte pravidelně následujícím postupem:





1. Před čištěním odpojte pumpu od zdroje napájení a vypněte ji, jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.
 2. Houbičkou nebo hadříkem namočeným v teplé vodě s mýdlem vyčistěte pumpu.
 3. Pumpa je odolná proti vodě, a můžete ji tedy při čištění opláchnout pod tekoucí teplou vodou.
 4. Důkladně ji vysušte měkkým hadříkem, než ji znovu použijete.
- Pumpu neponořujte do vody.
 - Nesterilizujte v autoklávu.
 - Silné čisticí/dezinfekční prostředky a isopropylalkohol mohou poškodit kryt pumpy.

Záruka a opravy

Interval údržby je každých 5 let. Servis a opravy smí provádět pouze servis schválený společností Nestlé Health Science.

Pokyny pro řešení alarmů

Provádějte přiměřenou a pravidelnou kontrolu výživové sondy. Když zazní alarm:

Krok	Tlačítko	Postup
1.		Stisknutím tlačítka  alarm potvrdíte.
2.		Vyřešte jednotlivé alarmy dle pokynů na následující straně.
3.		Stisknutím tlačítka  pokračujte v podávání výživy.

Kontakt:

 Nestlé Health Science

Compat ella[®]